

Infusion rate monitor

DripAssist

自然滴下モニター「ドリップアシスト」

for Vet



DripAssist が自然滴下における輸液時の作業負担を軽減します。

輸液ポンプの数分の1のコストで、ありがちな自然滴下のストレスから解放されます。

- ・滴下速度の調整をすばやく簡単にします。
これまでのような経験や勘、目視によるカウントも不要です。
- ・アラーム機能で作業ロスを回避します。
- ・輸液ポンプの不足時や電源が確保できない時などにも。
- ・在宅での使用も増えています。



豊富なモニター項目

現在の薬剤の滴下の状況をセンサーが検知し表示します。(表示項目は選択式)

- ▶ 1時間あたりの流量
- ▶ 1分間あたりの滴下数
- ▶ 開始から現在までのトータル流量

アラーム機能で安心

- ▶ 設定した任意の流速範囲から逸脱したときや薬剤がなくなったときにアラームします。無駄な確認作業や作業ロスを低減します。
- ▶ 一時的に流速が乱れてアラームが発動しても、流速が正常に戻ればアラームも止まります。アラームによるむやみな作業中断を回避します。

【仕様】

寸法	127 (W) × 28 (D) × 61 (H) mm
重量	115g
電源	単三アルカリ乾電池
計測項目	流量 (ml/min)/滴下数 (滴下数/min)/滴下量 (累計)
アラーム機能	On/Off 設定可 ±13%の流速変動時または輸液停止時

滴下速度の設定が用意に

▶ 輸液チャンバーに本器を設置後、すぐに現在の滴下状況を表示します。表示を確認しながら速度調整できるので簡単です。

いままでのように経験や勘、あるいは時計をにらみながらのカウントも必要ありません。



【適合】

輸液チャンバー	(最小径) 13.0mm、(最大径) 21.0mm
輸液セット	10, 15, 20, 60 gtt/mL 標準的な輸液セットに適合。

※本製品には滴下の速度や流量を制御する機能はありません。
※輸液バックの薬液が減少するに従って、輸液セット内の圧力低下によって滴下量及び滴下速度が少なくなります。

株式会社キムラメド

住所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 4-14-1-1
電話 03-5849-3192 FAX 03-5849-3193
✉ info@kimuramed.com http://www.kimuramed.jp/

