

■ アニセラ8 主な仕様

駆動源

所要ガス源・定格圧力	医療用酸素又は圧縮空気 0.4±0.05MPa
所要電源・定格電圧	交流電源: AC100～240V、50/60Hz 内部バッテリー: DC12V

設定換気条件等

換気モード	PC-SIMV
換気回数	0～60回/分
吸気時間	0.2～3.0秒
一回換気量	50～1500mL (吸気時間及びデマンドフローを最小・最大に設定した時の換気量)
デマンドピークフロー	15～30L/分 (ハイフロー時: 最大30L/分)
PCV/E	5～30hPa±10%
トリガ感度	-9～+20hPa±10%
気道内圧警報下限設定	1～40hPa可変、設定値は気道内圧バーグラフ
PCV/E	5～30hPa±10%
トリガ感度	-9～+20hPa±10%
気道内圧警報上限設定	5～70hPa可変、設定値は気道内圧バーグラフ
ファンクションキー	アスタリスク(*)形式スイッチ (本キーと同時に他の各キーを操作することにより拡張機能呼び出す)

環境条件等

使用環境	温度: 10～40°C、湿度: 30～90% (結露なきこと)
保管環境	温度: -10～60°C、湿度: 30～95% (結露なきこと)
気圧	800～1060hPa
気圧	700～1100hPa

承認・適合規格

電撃の保護形式・保護程度	保護形式: クラスI機器 / 内部電源機器
保護程度	保護程度: BF形装置部
一般的名称	呼吸補助器
医療機器区分	管理医療機器
承認番号	農林水産省指令26動薬第2253号

■ アニセラc15 主な仕様

供給ガス源

ガスの種類	医療用酸素及び空気
定格供給圧力	0.4±0.05MPa

機能及び設定範囲

流量計	酸素: 0.1～5L/min 空気: 0.5～5L/min
気道内圧計 (オプション)	圧力: -10～100hPa
酸素フラッシュ	流量: 35～75L/min (0.4MPa時)
キャニスタ	容量: 1,000mL

お問い合わせ

寸法・重量

本体寸法・重量	寸法: 225(W)×137(H)×180(D) (突起部を除く)
重量	5.0kg

警報関係及び安全機構

気道内圧下限警報	下限圧設定範囲: 1～40hPa、可視可聴
気道内圧上限警報	上限圧設定範囲: 5～70hPa、可視可聴
吸気圧リミット機能付き	
供給ガス圧低下警報	規定範囲: 300～700kPa逸脱時、可視可聴
無呼吸警報	無呼吸検出時間 (工場出荷時=15秒) に機械換気及び、自発呼吸の何れも検出しないとき、可視可聴
無呼吸バックアップ換気	設定可能検出時間: 15、20、25、30秒 無呼吸警報が発生した場合、発報から2秒後に吸気時間1.0秒で設定されたバックアップ換気回数にて呼吸動作を開始。吸気トリガがかかるか又は設定を変更する等により無呼吸警報が解除されると、無呼吸バックアップを終了する
AC電源遮断警報	AC100Vの供給が遮断したとき、可視可聴で警報、バッテリー駆動選択時、消音キー3秒以上長押しで警報音の消音可
バッテリー低下警報	残量がバックアップ可能時間の1/2及び1/3まで低下したとき可視可聴
警報消音 / 音量	各アラームを2分間消音可 (AC電源遮断警報時のみ警報停止) 自動復帰機能付き。*キースイッチと消音キースイッチで音量調節可能
CPU監視機構	ウォッチドグタイム
内部バッテリー	DC12V充電式バッテリー
バックアップ時間	バックアップ時間約2時間
過圧安全弁	50+20hPa以上、大気へ開放

表示・その他

電源スイッチ	照光式押しボタンスイッチ、ガードバリア付
気道内圧メータ	-10～+70hPa、直線バーグラフ表示
スタート / スタートバイスイッチ	ON/OFFにより動作 / 停止を切替
操作受付音 / 設定エラー音	スイッチ操作受付音及び範囲外設定エラー音により操作状態及び操作不能状態等の明示
設定値ガード / 早送り機能	設定値変更操作時の確実なスイッチ動作、及び迅速な操作のための早送り機能を装備

気化器

搭載数	1基
-----	----

本体寸法・重量

本体寸法	300(W)×240(D)×400(H)mm (突起部を除く)
本体重量	9.5kg (気化器を除く)

承認事項

一般的名称	麻酔器並びに麻酔用呼吸器及びガス吸収かん
医療機器区分	管理医療機器
承認番号	農林水産省指令26動薬第2514号

CMS クロス・メディカルサービス株式会社
Cross Medical Service
URL <http://www.cross-ms.co.jp>

本社 〒130-0026 東京都豊田区両国 両国2丁目2番9号 TEL:03-3633-6333/FAX:03-3633-1333
西日本支店 〒570-0092 大阪府守口市日月光町3-6-101 TEL:06-6967-8778/FAX:06-6967-8780
九州支店 〒812-0035 福岡県福岡市博多区中興町2番25号 TEL:092-263-8880/FAX:092-263-8817

Anithera Series

アニセラシリーズ



CMS
Cross Medical Service

Anithera 8

動物にやさしい動物専用の人工呼吸器「アニセラ8」



定価 788,888円 (税抜)

「アニセラ」とは、アニマル/セラピーを合体させた、動物に対する治療、治療術の意味を持つ造語です。

「アニセラ8」は動物にやさしい動物専用の人工呼吸器で、麻酔中の呼吸管理を安全・確実に行うことができる理想の人工呼吸器です。

- 小動物にとってより安全なPCVモードに、SIMV機能を装備したPC-SIMVモードで様々な換気条件を設定することができます。呼吸管理をフルカバーします。
- 無呼吸時にはアラームを発生すると共に、バックアップ換気を開始し患者の生命を守る安全設計です。
- 簡単操作できめ細やかな設定が可能で、充実したアラーム・安全機構を装備しています。
- 内部バッテリーにより、2時間以上のバックアップ動作継続が可能です。



Anithera.st

空気供給装置
アニセラ.st

麻酔器にルームAIRを供給しミキシングが利用可能。
この空気供給装置は弊社製造の麻酔器専用です。



本体サイズ: 150(W)×110(H)×(D) 重量: 1.0kg

Anithera-c15

動物にやさしい動物専用麻酔器「アニセラc15」



最新の動物麻酔管理に適合し、供給ガスは医療用酸素及び空気を採用しています。

視認性の良い流量計によりガス流量の微細な設定を容易に行うことができます。

オプションの気道内圧計を装備すれば、麻酔中の呼吸回路内圧を常時監視することが可能です。

定価 435,000円 (税抜)
※ 気化器は別売り

気化器、人工呼吸器との組み合わせにより、完璧な動物麻酔管理が可能



システム架台

本体サイズ	470(W)×600(D)×1325(H)
天板サイズ	490(W)×320(D)
引出しサイズ	430(W)×280(D)×150(H)

アニセラ架台

本体サイズ	480(W)×600(D)×1395(H)
天板サイズ	485(W)×350(D)
棚板サイズ	400(W)×350(D) ※1

※1 棚板の高さは必要に応じ変更可能です。